



TESLA SMART BLOOD PRESSURE MONITOR

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

Przed wykorzystaniem przeczytaj uważnie niniejszy podręcznik użytkownika i przechowaj ją.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

- Twój nowy ciśnieniomierz cyfrowy wykorzystuje oscylometryczną metodę pomiaru ciśnienia krwi. Oznacza to, że ciśnieniomierz odczytuje ruch krwi w tętnicy ramiennej i przelicza go na dane cyfrowe. Ciśnieniomierz oscylometryczny nie wymaga wykorzystania stetoskopu, a więc jego wykorzystanie jest bardzo proste.
- Inteligentne nadmuchiwanie obniża nieprzyjemne uczucie w razie nieodpowiedniego nadmuchania i skraca czas pomiaru, co przedłuża żywotność mankietu.
- Ciśnieniomierz zapisuje 2x199 zmierzonych wartości. Każda uzyskana wartość zostanie przedstawiona na wyświetlaczu i automatycznie zostanie zapisana w pamięci urządzenia. To urządzenie wykorzystuje klasyfikację ciśnienia krwi i z jego pomocą łatwo dokonasz pomiaru ciśnienia krwi.
- Niniejszy automatyczny ciśnieniomierz można wykorzystać do pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna. W pakiecie znajduje się korpus urządzenia, mankiety oraz podręcznik użytkownika. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać tylko osoby dorosłe.

PRZEZNACZENIE

Automatyczny ciśnieniomierz jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna, które są dokonywane w górnej części przedramienia. Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania przez osoby starsze 12 lat w domu oraz w szpitalu.

Przeciwwskazania

Niniejszy produkt nie może być wykorzystany przez pacjentów z poważnymi chorobami serca, by nie doszło do uduszenia i śmierci. Niniejszy produkt nie jest odpowiedni dla niemowląt oraz dzieci.

- W celu należytego wykorzystania produktu trzeba zawsze

dotrzymywać podstawowe zabiegi bezpieczeństwa i poświęcać uwagę ostrzeżeniom oraz przestrogom podanym w podręczniku użytkownika:

⚠ OSTRZEŻENIE: To ostrzeżenie identyfikuje niebezpieczeństwa, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ UWAGA: To ostrzeżenie identyfikuje niebezpieczeństwa, które mogą spowodować lekkie obrażenia osób, uszkodzenie produktu lub mienia.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

⚠ Osoby mające problemy z arytmią, cukrzycą, krążeniem krwi lub apopleksją, muszą z urządzenia korzystać zgodnie z poleceniami lekarza.

⚠ Połącz się ze swoim lekarzem, który udzieli ci konkretnych informacji dotyczącym twojego ciśnienia krwi. Samodiagnostyka oraz samoleczenie na podstawie zmierzonych wartości może być niebezpieczne. Kieruj się instrukcjami swojego lekarza lub wykwalifikowanego pracownika medycznego.

⚠ Ciśnieniomierz umieść na wywyższonym miejscu, na które nie dosięgną dzieci.

⚠ Na urządzeniu nie jest pozwolone wykonywać żadnych modyfikacji.

⚠ Urządzenie jest zakazane modyfikować bez zezwolenia producenta.

⚠ Gdy urządzenie zostanie zmodyfikowane, trzeba przeprowadzić kontrolę oraz testowanie, aby zabezpieczyć bezpieczne wykorzystanie urządzenia.

⚠ Wężyk mankietu owinięty wokół szyi może prowadzić do uduszenia.

⚠ Połknięcie małych części, jak woreczek opakowaniowy, baterie, osłona baterii itp., może prowadzić do uduszenia.


- ⚠ Do czyszczenia urządzenia nie stosować rozpuszczalników, alkoholu lub benzyny. Urządzenie trzeba chronić przed silnymi mrozami, uderzeniami oraz upadkiem z wysokości. Podczas wykorzystania nieodpowiedniego mankietu urządzenie nie będzie działało.
- ⚠ Nigdy nie pozostawiaj baterii w przestrzeni na baterie, ponieważ mogłyby wyciec i uszkodzić urządzenie.
- ⚠ Gdy urządzenie nie zostanie wykorzystane przez 3 miesiące, wyjmij baterię.
- ⚠ Jak tylko na urządzeniu pojawi się symbol słabej baterii, baterie trzeba wyjąć.
- ⚠ Nie mieszaj baterii starych i nowych.
- ⚠ Nie używać urządzenia na obszarach z dużym promieniowaniem, aby zmierzone wartości były poprawne.
- ⚠ Nie używaj urządzenia w miejscach, w których znajduje się gaz palny (np. środek znieczulający, tlen lub wodór) lub ciecz palna (np. alkohol).
- ⚠ Nie dotykaj równocześnie wyjścia adaptera prądu zmiennego oraz pacjenta.
- ⚠ Podczas wymiany baterii nie dotykaj równocześnie bieguna baterii oraz pacjenta.

OSTRZEŻENIE

Nie wyrzucaj urządzenia elektrycznego do niesortowanego odpadu z gospodarstw domowych, lecz zanieś go do stosownego punktu zbioru. Informacje na temat dostępnych punktów zbioru można zdobyć w urzędzie lokalnym. Gdy urządzenia elektryczne są utylizowane na wysypiskach, substancje niebezpieczne mogą wyciekać do wód podziemnych i trafić do łańcucha pokarmowego, co może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie oraz dobre warunki życiowe.

KLASYFIKACJA

1. Urządzenie z wewnętrznym źródłem zasilania;
2. Aplikowana część typu BF;
3. Ochrona przed przenikaniem wody lub cząstek stałych: IP21;
4. Nie chodzi o urządzenie z kategorii AP/APG;
5. Tryb operacyjny Praca przerywana

 Użytkownik musi przed wykorzystaniem sprawdzić, czy urządzenie działa w sposób bezpieczny, jak też przekonać się, że znajduje się w należyłym stanie operacyjnym.

OPIS PRODUKTU

Korpus

Gniazdo do przyłączenia
złącza wężycy
powietrznego mankietu




Ustawiany mankiety



Wyświetlacz


Złącze mankiety

Skurczowe ciśnienie krwi

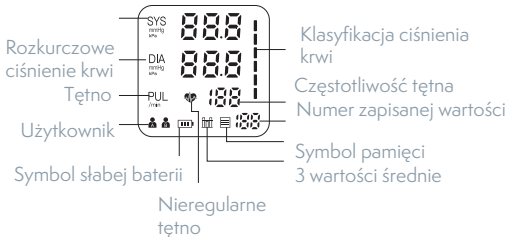

Mankiet, który jest częścią wyposażenia, ma rozmiar L, i jest przeznaczony do przedramienia o obwodzie 22-42 cm. Mankiet jest uważany za część aplikowaną.

Wsuń złącze z wężymki mankietu do otworu, który znajduje się po lewej stronie urządzenia, patrz rysunek. (Jest pozwolone używać tylko jeden dostarczony mankiety, nie można go zastąpić mankiety innej marki).

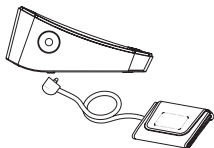


WŁOŻENIE BATERII

Usuń osłonę z przestrzeni na baterie i włóż baterie.

a) Usuń osłonę, patrz rysunek.

b) W przestrzeń na baterie włóż 4 wydajne baterie AAA, uważaj na poprawną biegunowość.

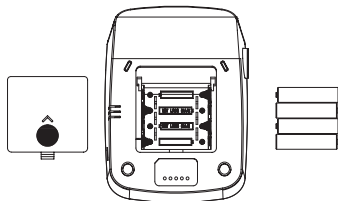

Słaba bateria i wymiana:

Gdy po włączeniu urządzenia pojawi się symbol  słabej baterii, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać.

Typ baterii i wymiana


Zastosuj 4 alkaliczne baterie typu AAA tego samego rodzaju, 1,5 V. Nie używaj baterii z wygaśniętym upływem żywotności. Gdy nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z urządzenia, wyciągnij z niego baterie.

OSTRZEŻENIE

Baterie zutylizuj w zgodzie z wszystkim federalnymi, państwowymi oraz lokalnymi władzami. Baterii nie pal, ani też nie spalaj, w przeciwnym razie grozi ryzyko pożaru oraz wybuchu.

Techniczne właściwości adaptera

Napięcie wejściowe: Typ-C 5 V \pm 5 %
Prąd wyjściowy: Min. 600 mA

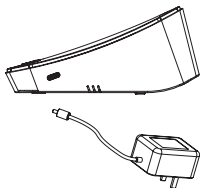





TRYB USTAWIEŃ

Uwaga:

- Podczas wykorzystania adaptera USB urządzenie nie zużywa energii baterii.
- W razie nagłego przerwania pomiaru (np. w konsekwencji niechcianego wyciągnięcia wtyczki) trzeba wtyczkę ponownie przyłączyć a pomiar włączyć ponownie.

Ustawienie użytkownika

Wyłącz urządzenie i naciśnij przycisk  . Na wyświetlaczu pojawi się  lub , pomiędzy którymi można przełączać przy pomocy przycisku.  . Użytkownika potwierdzasz przez naciśnięcie przycisku Start/Stop.

Ustawienie urządzenia

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk ustawień. Na wyświetlaczu pojawi się 0 lub 0.0. Naciśnij przycisk pamięci i możesz przełączać pomiędzy jednostką kPa a mmHg. Jednostkę potwierdzisz przez naciśnięcie przycisku ustawień.

POPRAWNE WYKORZYSTANIE JEDNOSTKI

Pomiar

Przed pomiarem

- Przed pomiarem pozostań mniej więcej dziesięć minut w spokoju. 30 minut przed pomiarem nie jedz, nie pij napojów alkoholowych, nie pal, nie ćwicz i nie bierz kąpeli. Wszystkie te czynniki wpływają na wynik pomiaru.
- Odłóż jakąkolwiek część ubrania, która przywiera do górnej części twojej ręki.
- Pomiar dokonuj zawsze na tej samej ręce (zazwyczaj lewej).
- Pomiaru dokonuj regularnie każdego dnia o tej samej godzinie, ponieważ ciśnienie krwi zmienia się także w trakcie dnia.

Częste przyczyny niepoprawnego pomiaru

- Jakąkolwiek próba pacjenta o wsparcie ręki może spowodować wzrost ciśnienia krwi.
- Upewnij się, że znajdujesz się w wygodnym położeniu a w trakcie pomiaru nie aktywizuj żadnych mięśni ręki, na której dokonuje pomiaru. W razie potrzeby rękę wesprzyj poduszką.
- Gdy tętnica ramieniowa będzie się znajdowała wyżej lub niżej od serca, uzyskane wartości nie będą poprawne.

Uwaga

- Zastosuj tylko klinicznie zatwierdzone mankiety!
- Luźny mankieta lub niedostosowana poduszka powietrzna mogą prowadzić do niewłaściwych wartości.
- W wypadku powtarzanych pomiarów dochodzi do gromadzenia krwi w ręce, co może prowadzić do nieodpowiednich danych.

Po sobie idące pomiary ciśnienia krwi powinno się wykonywać z minutową przerwą lub po podniesieniu ręki, aby nagromadzona krew mogła odpłynąć.

Umieszczenie mankietu

1) Połóż mankieta na stole rzepem do dołu. Końcówkę mankieta przeciągnij przez metalową klamrę, aby powstał tunelik. Teraz rzep będzie zmierzał do góry (gdy mankieta jest już przygotowany, niniejszy krok pomiń).

2) Nawlecz mankieta na górną część lewej ręki, aby wążek zmierzał w kierunku przedramienia.

3) Mankieta owiń wokół ręki, patrz rysunek. Upewnij się, że dolna krawędź mankieta znajduje się mniej więcej 2-3 cm nad łokciem a gumowy wążek z wewnętrznej strony ręki.

4) Dociągnij swobodną końcówkę mankieta i przyklej ją do rzepu.

5) Mankieta powinien przylegać do ręki tak, aby pomiędzy górną część ręki a mankieta można było wsunąć 2 palce. Odłóż jakąkolwiek część ubrania, która ogranicza rękę.

6) Mankieta zabezpiecz przy pomocy rzepu tak, aby był wygodny, lecz niezbyt luźny. Rękę połóż na stole (dłonią do góry) tak, by mankieta był w tej samej wysokości co serce. Wążeka nie zginaj.



Uwaga

Gdy mankieta nie można umieścić na lewej ręce, można go umieścić także na prawej. Wszystkie pomiary powinno się jednak dokonywać na tej samej ręce.

Proces pomiaru:

Po należytych umieszczeniu mankietu można rozpocząć pomiar:

1) Naciśnij przycisk Start/Stop, na wyświetlaczu pojawią się wszystkie symbole. Później mankiety zaczną się wypełniać powietrzem a na wyświetlaczu pojawi się wartość rosnącego ciśnienia w mankiecie.

2) Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia nadmuchiwanie się zatrzyma, ciśnienie zacznie stopniowo opadać. Wartość ciśnienia jest pokazana na wyświetlaczu. W razie, że mankiety nie jest należycie nadmuchiwanie, urządzenie automatycznie go nadmucha.

3) Jak tylko urządzenie wykryje sygnał, na wyświetlaczu zacznie migać symbol  serca.

4) Uzyskane wartości będą na wyświetlaczu pokazane tak długo, dopóki urządzenia nie wyłączysz. Gdy w trakcie 3 minut nie naciśniesz żadnego przycisku, urządzenie automatycznie się wyłączy - oszczędza energię.

Uwaga

Symbol  pojawi się koło wartości tylko w wypadku, że w trakcie pomiaru zostanie wykryte nieregularne tętno serca.

Przerwanie pomiaru

Gdy pomiar ciśnienia krwi trzeba z jakiegokolwiek powodu przerwać (np. gdy pacjent nie czuje się dobrze), kiedykolwiek można nacisnąć przycisk Start/Stop. Urządzenie natychmiast automatycznie obniży ciśnienie w mankiecie.

Zapisywanie zmierzonych wartości do pamięci

Niniejszy ciśnieniomierz zapisuje automatycznie 2x199 zmierzonych wartości. Jak tylko w pamięci urządzenia zostanie zapisanych 199 wartości, najstarszy zapis będzie zastąpiony najnowszą uzyskaną wartością.

Przedstawienie zapisanych zmierzonych wartości

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk pamięci. Na wyświetlaczu pojawią się 3 średnie wartości. Ponownie naciśnij przycisk pamięci, na wyświetlaczu pojawi się ostatnia wartość pomiaru. Każde dalsze naciśnięcie przycisku spowoduje pojawienie się dalszej zmierzonej wartości.


Anulowanie zapisanych zmierzonych wartości

Ta funkcja stosuje się w wypadku, że na stałe chcesz anulować wszystkie zapisane wartości. Wyłącz urządzenie i dwukrotnie naciśnij przycisk ustawień, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się „CL”. Później naciśnij przycisk Start/Stop, „CL” zamiga czterokrotnie i z pamięci zostaną anulowane wszystkie zapisane wartości. Potem naciśnij przycisk pamięci, na wyświetlaczu pojawi się oraz „No”, co oznacza, że pamięć została anulowana.

ZASTOSOWANIE

1 Przygotowanie do używania

- Aplikacja Tesla Smart jest do dyspozycji dla systemów operacyjnych iOS oraz Android. W App Store lub Android Market odszukaj „Tesla Smart”, lub zeskanuj kod QR, pobierz aplikację i zarejestruj się lub zaloguj do swojego konta.
- Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do sieci 2,4 GHz i ma włączony Bluetooth oraz GPS.

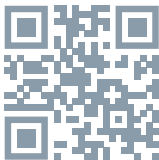

2 Przyłączenie urządzenia

- Otwórz aplikację Tesla Smart i do dodania nowego urządzenia kliknij w symbol „+”.
- Wybierz „Health care - Tesla Smart Blood Pressure Monitor”.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, które przeprowadzą cię krok po kroku dodaniem ciśnieniomierza Tesla Smart Blood Pressure Monitor.
- Długo naciśnij przycisk ustawień na ciśnieniomierzu, na wyświetlaczu pojawi się „bt” a urządzenie przejdzie w tryb parowania Bluetooth.

3 Kontrola urządzenia

- Obsługuj ciśnieniomierz za pośrednictwem aplikacji.

4 Ustawianie użytkowników

- Urządzenie umożliwia dodanie dwóch użytkowników.
- W głównym interfejsie aplikacji możesz przełączać pomiędzy użytkownikiem 1 a użytkownikiem 2 i wyświetlić dane dotyczące stosownego użytkownika.
- Użytkowników można przełączać tak na urządzeniu, jak też w aplikacji.
- Gdy jesteś podłączony do aplikacji Tesla Smart, po zakończeniu pomiaru ciśnienia krwi ciśnieniomierz automatycznie przełączy użytkownika i zacznie synchronizować ustawienia użytkownika aplikacji.


INFORMACJE DOTYCZĄCE CIŚNIENIA KRWI

Ciśnienie krwi to ciśnienie oddziałujące na tętnice.

Wartość skurczowego ciśnienia krwi to ciśnienie krwi, które powstaje podczas skurczu mięśnia sercowego.

Wartość rozkurczowego ciśnienia krwi to ciśnienie krwi, które powstaje podczas rozkurczu mięśnia sercowego.

Skurczowe ciśnienie krwi

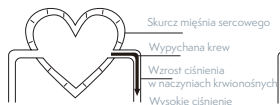


Rozkurczowe ciśnienie krwi



- Klasyfikacja poziomów ciśnienia krwi wg WHO/ISH.
- SYS niższy niż 100 mmHg (13,3 kPa) uważa się za nadciśnienie.


Rozkurczowe ciśnienie krwi (mmHg)

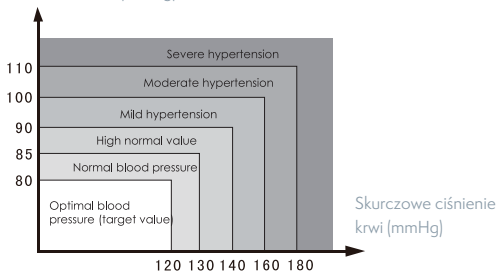

SYTUACJE WYJĄTKOWE

Wskazywanie błędów

Przy niezwykłym pomiarze na wyświetlaczu pojawi się poniższy symbol.

Symbol	Przyczyna	Rozwiązanie
E-1	Słaby sygnał lub nagła zmiana ciśnienia	Umieść mankiet na ręce w poprawny sposób.
		Pomiar przeprowadź ponownie właściwym sposobem.
E-2	Błąd w trakcie nadmuchiwania	Pomiaru nie można dokonywać w pobliżu komórki lub innego urządzenia, które emituje promieniowanie.
		W trakcie pomiaru pozostań w spokoju i nie mów.
E-3	Słaba bateria	Umieść mankiet na ręce w poprawny sposób.
		Sprawdź, czy złącze wężyka powietrznego został przyłączony do urządzenia w należyty sposób.
		Pomiar przeprowadź ponownie.
E-5	Abnormalny krwny tlak	Pomiar przeprowadź ponownie po 30 minutach w spokoju. Gdy trzykrotnie pod rząd osiągniesz niezwykle wartości, odwiedź lekarza.
	Słaba bateria	Wymień wszystkie stare baterie za nowe.

Usuwanie problemów

Problem	Kontrola	Przyczyny i rozwiązanie
Ciśnieniomierz nie jest zasilany.	Sprawdź, czy baterie nie są wyładowane.	Wymień baterie za nowe.
	Sprawdź, czy baterie zostały umieszczone poprawnie.	Włóż baterie, uważaj na prawidłową biegunowość.
Mankiet się nie nadmuchiwa.	Sprawdź, czy złącze zostało przyłączone.	Zasuń wężyk powietrza do gniazda w należyty sposób.
	Sprawdź, czy złącze nie jest uszkodzone i jest szczelne.	Wymień mankiet za nowy.
Pojawił się błąd, urządzenie przestało działać.	Sprawdź, czy podczas nadmuchiwania nie poruszasz ręką.	Siedź spokojnie.
	Sprawdź, czy podczas pomiaru nie mówisz.	Nie rozmawiaj podczas pomiaru.
Mankiet nie jest szczelny.	Sprawdź, czy mankiet nie jest zbyt luźny.	Dociągnij mankiet.
	Sprawdź, czy mankiet nie został uszkodzony.	Wymień mankiet za nowy.

Gdy problemu nie uda Ci się rozwiązać, zwróć się do dystrybutora, nie staraj się urządzenia demontować samemu!

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Pielęgnacja urządzenia oraz mankietu ciśnieniomierza

- Gdy urządzenie nie używasz, przechowuj go w etui do przechowania.
- Ciśnieniomierz należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosuj żadnych środków ściernych ani też lotnych środków czyszczących.
- Urządzenie ani też żadną jego część nigdy nie zanurzaj w wodzie.

- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że ciśnieniomierz jest wyłączony. Do czyszczenia urządzenia możesz wykorzystać mieszankę wody destylowanej oraz 10% wybielacz.
- Przy pomocy spryskiwacza napryskaj na miękką szmatkę mieszankę wody i wybielacza lub środka czyszczącego tak, aby szmatka była całkowicie wilgotna. Wyciśnij nadmiar wilgoci, aby ze szmatki nie kapła woda i mankieta nie był zbyt wilgotny.
- Uważnie zetrzyj powierzchnię ciśnieniomierza oraz zewnętrzną i wewnętrzną stronę mankieta. Uważaj na to, by do urządzenia nie wniknęła wilgoć.
- Przy pomocy suchej szmatki zetrzyj z mankieta nadmiar wilgoci. Rozwiń mankieta, połóż go na prostej powierzchni i pozostaw wyschnąć.

Konserwacja

- Do czyszczenia urządzenia ani mankieta nie używaj nafty, rozpuszczalnika, benzyny itp.
- Mankieta nie mocz ani też nie czyść wodą.
- Urządzenie przechowuj w czystym i suchym miejscu.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, wilgoć oraz bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Gdy urządzenie nie będziesz używał przez co najmniej 3 miesiące, wyciągnij z niego baterie.

W razie niedotrzymania instrukcji dotyczących pielęgnacji oraz utrzymania produktu nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy z jakością.

SPECYFIKACJA

Opis	Automatyczny ręczny ciśnieniomierz
Wyświetlacz	LED wyświetlacz cyfrowy
Zasada działania	Metoda oscylometryczna
Miejsce pomiaru	Górna część ręki
Zakres pomiaru	Ciśnienie: 0~299 mmHg
	Tętno: 40~199 uderzeń/min.
Precyzja	Ciśnienie: ± 3 mmHg
	Tętno: $\pm 5\%$ uzyskanej wartości
Kontrolka LED	Ciśnienie: wyświetlenie wartości trzycyfrowej mmHg
	Tętno: wyświetlenie wartości trzycyfrowej
	Symbol: Pamięć / Tętno / Słaba bateria
Funkcja pamięci	2x199 zapisanych zmierzonych wartości
Źródło zasilania	4 szt. baterie alkaliczne AAA / Typ-C 5 V
Automatyczne wyłączenie	za 3 minuty
Masa jednostki głównej	ok. 260 g (bez baterii)
Rozmiar jednostki głównej	138mm x 100mm x 62mm
Żywotność jednostki głównej	10 000 pomiarów w wypadku normalnego stosowania
Żywotność baterii	300 pomiarów w wypadku normalnego stosowania
Akcesoria	Mankiet, podręcznik użytkownika
Warunki eksploatacji	Temperatura: 5~40°C
	Wilgotność: 15~93% wilgotności względnej
	Ciśnienie powietrza: 86~106 kPa
Warunki przechowania	Ciśnienie powietrza: 86~106 kPa; Temperatura: -20~55 °C; Wilgotność: 10~93% wilgotności względnej. Podczas transportu urządzenie trzeba chronić przed uderzeniami, promieniowaniem słonecznym lub deszczem.
Zakładana żywotność urządzenia	5 lat

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EÜ

Shenzhen Urion Technology niniejszym oświadcza, że U82RH urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Zakresu(-ów) częstotliwości: 2.412 - 2.472 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm



0123



Manufacturer

Shenzhen Urion Technology Co.,Ltd.

Floor 4-6th of Building D , Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3
, ChuangWei Road ,Heshuikou Community,MaTian Street,GuangMing New
District, 518106 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: 86 -755-29231308 E-mail:urion@urion.com.cn MADE IN CHINA



Eu representative

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel:+49-40-2513175

Wykonane dla: Tesla Global Limited
www.teslasmart.com